

## Meil on hea meel, et olete SleepAngel™ toote kasutaja!

SleepAngel™ toodetes kasutatud patenteeritud PneumaPure™ tehnoloogia blokeerib bakterid ja allergeenid, mis pääsevad tavalistesse voodiriietesse\*. Astma ja allergia käes kannatavad inimesed on tihti väga tundlikud tolmulestadest, lemmikloomade ja muude allergeenide suhtes. SleepAngel™ tootmisel on aga kasutatud vedelikukindlat kattematerjali, kokkusulatatud külgesid ning nanotehnoloogilist filtrit, mis võimaldab puhta õhu ära- ja juurdevoolu, et kindlustada toote mugavus ja pehmus, samal ajal blokeerides allergeenide, pisikute ja viiruste liikumist.

## Pakendi avamine

Enne kasutamist laske SleepAngel™ tootel seista mõni tund toatemperatuuril, et see saavutaks esialgse kuju, kui see on tarne käigus muutunud.

## Padja kasutamine

SleepAngel™ padi pakub jahedust ja mugavust nii selili kui ka külili magades. Filter võimaldab õhu sisse- ja väljaliikumist ning padi reageerib vastavalt pea asetusele ja rõhule. Aeglaselt peakujuga kohanduv materjal, mis on ainulaadse SleepAngel™ eripäraks, tagab, et toode töötab täpselt nii, nagu vaja. Seetõttu võib võtta veidi aega, et sellega harjuda. Meie soovituslik kohanemise aeg on 1 nädal. Enne esimest kasutamist suruda padjast üleliigne õhk välja. Kasutada võib padja mõlemat poolt. Soovitame kasutada padjapüüri, mida pesta regulaarselt, vähemalt kord kuus.

## Pesemine ja puhastamine

SleepAngel™ toode on vedeliku- ja mustuskindel ning plekke hülgav. Toode puhastatakse vaid pindmiselt niiske ja puhta lapiga. Vajadusel on lubatud kasutada desinfitseerimisvahendeid. Pinnale tekkinud suurema mustuse eemaldamiseks peske toode kraani või duši all, kasutades vajadusel puhastusgeele. Seejärel kuivatada rästi või paberiga. SleepAngel™ tooteid ei tohi pesta pesumasinas ega keemilises puhastuses. Kuna sisu kasutades ei saastu, ei olegi see vajalik. Küll aga võib pesumasin ja keemiline puhastamine rikkuda filtrit ning ühtlasi kogu toote funktsiooni. Soovitame filtri ning katte pinda puhta ja niiske lapiga kergelt pühkida iga kord, kui voodipesu vahetate. Vähemalt kord kuus, kui mitte tihedamini.

## Defektid

Toodete filtertehnoloogia ei tööta, kui filter on rikutud või kangas mehaaniliselt kahjustatud või rebenenud. Kahjustatud tooted tuleks kasutusest eemaldada. Garantiitingimuste alla kuuluvad vaid defektsed, mitte kahjustatud tooted.

## Oluline teave astma ja allergia korral

SleepAngel™ tooted on mõeldud vaid täiendada Teie kvalifitseeritud arsti nõuandeid ja ettekirjutusi. Neid tooteid kasutades järgige oma arsti soovitusi. Ärge muutke ettenähtud ravirežiimi.

\* Toodetel on tõestatud võime blokeerida ALLERGEENIDE – tolmu-, kassiallergeenid; BAKTERITE – *MRSA*, *Pseudomonas aeruginosa*; PATOGEENIDE, HALLITUSTE – *Candida albicans*, *Aspergillus niger*; ja isegi VIIRUSTE – *Influenza Type A*, *Adenovirus 5* pääsemist toodetesse ning hoiab täielikult ära täitematerjali saastumise.

Testitud Airmid Healthcare mikrobioloogia labor Iirimaa, septembris 2012.